

## Használati útmutató a SANALK PLUS felület fertőtlenítő szerhez

Összetétel: 0,32% benzalkónium-klorid, ionmentes víz

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV és HIV inaktíváló hatású is).

alkalmazási terület: alkoholálló és alkoholérzékeny kisebb felületek (pl. plexiüveg és ultrahang, röntgen, mammograph, stb.) vizsgáló berendezések beteggel érintkező felületei és alkatrészei. Szoláriumok és fürdők felületi fertőtlenítése.

Alkalmazás módja: a készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. A fertőtlenítendő felületet a szórófej segítségével be kell permetezni úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. Ha szükséges, törölkendővel a felületet áttöröljük.

Behatási idő : 1-5 perc, tuberkulocid hatás eléréséhez 10 perc.

Figyelmeztetés: S2 (gyermek kezébe nem kerülhet). Élelmiszerektől elkülönítve tárolandó. Szemirritáló hatású. Vigyázzunk, hogy a készítmény szembe ne kerüljön. Anionaktív tisztítószerek hatását csökkentik.

Elsősegélynyújtás: ha a készítmény szembe kerül, azt bő vízzel (10-15 percig) alaposan ki kell mosni és szakorvosi ellátást kell biztosítani.

Tűzveszélyességi osztály: "E" (nem tűzveszélyes).

Tárolás és eltarthatóság: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, szobahőmérsékletű helyen 3 évig eltartható.

Kiszerezési egység: 500 ml-es szórófejes flakon

### **Forgalmazó:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.**

**T: 06-29/413-553**

**Fax: 06-29/413-535**

**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu) Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**